

『ダイアレット』事前チェックリスト

重要

チェック項目		チェック内容	利用可能度	チェック	備考
要介護度 (介護保険給付対象)		要介護4または5	A	<input type="checkbox"/>	原則として介護保険の給付対象
		要介護3以下	B	<input type="checkbox"/>	移乗と排便に全介助を要する方は原則対象
利用目的		排尿＋排便処理	A	<input type="checkbox"/>	排便処理に最も大きな効果を発揮
		頻尿または多尿量	B・C	<input type="checkbox"/>	10分や15分おきの極度の頻尿の場合は難しい
		排尿処理のみ	A・B	<input type="checkbox"/>	尿だけの場合は尿のみの機器やオムツでも可能
性別		女性	A	<input type="checkbox"/>	
		男性	A・B	<input type="checkbox"/>	性器の形状により利用が難しいケースも
体形		普通	A	<input type="checkbox"/>	
		痩せている・かなり太っている	B・C	<input type="checkbox"/>	ウエスト40-85cmに入らない方は難しい
介護環境	介護者	主に家族(+ヘルパー)	A	<input type="checkbox"/>	夜間等、介護が手薄な時間帯の利用が効果的
		主にヘルパー(独居等)	A・B	<input type="checkbox"/>	ヘルパー全員の理解と協力が不可欠
排泄状況	排便	自然排便(含む軟便、水様便)	A	<input type="checkbox"/>	便の性質によって洗浄回数を自動調整
		下剤等による排便	A	<input type="checkbox"/>	肛門部の刺激が自然排便に繋がるケースも
		便秘癖のある方	B・C	<input type="checkbox"/>	最初に硬い便が出る事が多いので紙おむつと併用
		適便	D	<input type="checkbox"/>	排尿時だけの利用に終わる可能性が高い
	排尿	頻尿・多尿量	B	<input type="checkbox"/>	頻尿の度合いによる
		カテーテル・バルーン当使用	D	<input type="checkbox"/>	
睡眠等体位等		仰臥位(仰向け)	A	<input type="checkbox"/>	ベットのギャッチアップも特に制限無し
		寝返り(含む体位変換)	A・B	<input type="checkbox"/>	寝返り等は自由、体交は積極的に行う必要があり
		動きが激しい	C・D	<input type="checkbox"/>	「カップ」がずれて漏れてしまう可能性がある
排泄時体位		仰臥位(仰向け)	A	<input type="checkbox"/>	45度以内の仰臥位なら問題なし
		かなり不規則	A～C	<input type="checkbox"/>	排泄時にある程度仰臥位であれば利用可能
		常に側臥位(横向き)のまま排泄	D	<input type="checkbox"/>	排泄等にある程度仰臥いになれないと難しい
拘縮		ほとんど拘縮なし	A	<input type="checkbox"/>	
		少し拘縮あり	A・B	<input type="checkbox"/>	鼠径部の負担を十分確認する必要あり
		クロスして強い拘縮	C・D	<input type="checkbox"/>	「カップ」の装着が可能な場合は利用可
認知症 離床等		おむつを自分で外す	B～D	<input type="checkbox"/>	マジックテープを外す力があるかどうか
既往症、その他		感染症あり	A	<input type="checkbox"/>	汚れが大幅に少なくなる効果は大きい
		褥瘡、発赤あり	A～C	<input type="checkbox"/>	比較的早期であれば利用可能(ステージ2まで)

A: 利用対象者 B: 利用可能か否か事前にチェックが必要 C: 利用は難しい D: 利用不可

【特に利用が適していると思われる方】

- ①水様便や下痢でお困りの方(被介護者、介護者共に)
- ②女性
- ③下剤などを利用して排泄をしている方
- ④主に仰臥位で就寝される方

【利用は難しいと思われる方・利用には注意を要する方】

- ①かなり太っている方(ウエスト85cm以上)
- ②就寝時の動きが非常に激しい方
- ③完全側臥位のまま排泄される方
- ④足がクロスして強く拘縮している方
- ⑤24時間、便の状態や色などをチェックしなければならない方
- ⑥留置カテーテルを取り付けていたり、摘便が必要な方